

医療器具・超音波・白衣・便尿器などの洗浄に…。クリーンラック・シリーズ

三栄化工株式会社



■便座・尿器洗浄液
クリーンラックP

[容量]10ℓ……………¥13,000

便器・尿器の汚れ落とし用の洗浄液です。

使用濃度

- (10～50倍希釈)

使用方法

- 2～24時間完全に浸漬し、取り出した機器を直ちに水ですすいで下さい。ガンコな汚れは原液のままご使用下さい。



■アムス液
アムス内視鏡洗浄液 M-203

[容量]10ℓ……………¥12,000

血液、タンパク質などで汚れた内視鏡の洗浄を目的として開発された洗浄液です。

使用濃度

- 原液のままご使用ください

使用方法

- 取り出した器具はよく水洗いしてから消毒液をお使い下さい。



■試験器具・陶器洗浄液
クリーンラック

[容量]18ℓ……………¥18,000

汚れのひどい医療・理化学機器用の洗浄液です。

陶器類にも最適。

使用濃度

- 通常の汚れ2%(50倍希釈)ひどい汚れ(20倍希釈)極端な汚れ20%(5倍希釈)



■動物ケージ洗浄液
クリーンラック
(アルミステン材質)

[容量]18ℓ……………¥15,000

マウス・ラット・犬・さる等のケージ除菌洗浄液です。ケージに臭いが残りません。

使用濃度

- 5～7%(15～20倍希釈)



■超音波洗浄機用洗浄液(無リン)
クリーンラック M-205
医療・理化学器具用

[容量]4ℓ×4本……………¥16,000

超音波洗浄機用にも、一般浸漬用にも使用できる無リンの液体洗浄剤です。

脂肪、血液、タンパク質系の汚れに抜群の洗浄力。

使用濃度

- 2%(50倍希釈)

使用方法

- 2～24時間完全に浸漬し、取り出した器具をよく水洗いして下さい。(40℃～50℃位に加温するとより効果的です。)



■超音波洗浄機用洗浄剤・粉末(無リン)
クリーンラック M-208
医療・理化学器具用

[容量]4kg×4個……………¥16,000

超音波洗浄機および一般洗浄機にも使用できる無リン・粉末洗浄液です。脂肪、血液、タンパク質系の汚れに抜群の洗浄力。

使用濃度

- 通常50～100倍の水溶液。

使用方法

- 粉末を溶解した水溶液に2～24時間完全に浸漬し、取り出してからよく水洗いして下さい。(40℃～50℃位に加温するとより効果的です。)



■浴槽洗浄剤(無リン)粉末
クリンラック M-233
高級洗浄剤

[容量]4kg×4個……¥12,000

入浴後の浴槽洗浄が簡単でキレイに完了します。

もちろん無公害ですので安心してお使いいただけます。

使用方法

●浴槽のステンレス、プラスチック部の汚れに、ハケやスポンジに原末のままこすりとり、あと水洗いして下さい。



■洗浄剤
クリンラック SP

[容量]10ℓ………¥9,000

本品は塩化ベンザルコニウムの殺菌効果のある洗浄液です。

手洗い、その他、器具洗浄にもお使いいただけます。



■クリンラック
(アロエエキス配合スキンクリーム)

300g入…¥3,000

220g入…¥2,500

医療関係者向けスキンクリーム

●医療および、医理化器具のご使用のあとにお使い下さい。

(手足のあれ、肌荒れなどのお手入れにご使用下さい。)